

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Benutzerinformationen sorgfältig durch bevor Sie dieses Produkt verwenden. Diese Maske entspricht den Anforderungen der EU-Verordnung (EU) 2016/425 über Persönliche Schutzausrüstung und entspricht den Anforderungen der Europäischen Norm EN149:2001+A1:2009.

Auf die EU-Konformitätserklärung kann zugegriffen werden unter: www.avihealth.de/dokumente

Die Maske muss für die vorgesehene Verwendung geeignet sein. Es muss eine individuelle Risikobewertung vorgenommen werden. Prüfen Sie die Maske und Verpackung auf Unversehrtheit und offensichtliche Mängel oder Beschädigungen. Falls Sie eine Beschädigung feststellen, die Maske auf keinen Fall verwenden! Prüfen Sie, ob das Verfallsdatum nicht überschritten ist (siehe Verpackung). Prüfen Sie, ob die Schutzklasse (FFP2 NR) für die vorgesehene Anwendung geeignet ist.

Anwendung:

1. Klappen Sie die Maske auseinander (Nasenclip nach oben)
2. Positionieren Sie die Maske unter dem Kinn und bedecken Sie Mund und Nase
3. Legen Sie die Ohrschlaufen hinter die Ohren
4. Drücken Sie den Nasenclip über den Nasenrücken an, so dass die Maske dicht ist
5. Prüfen Sie durch festes ein und Ausatmen, ob die Maske rund herum am Gesicht anliegt und dicht ist. Wenn nicht, positionieren Sie die Maske neu und stellen den Nasenclip neu ein.



Einschränkungen:

Diese Maske eignet sich zum Schutz vor ungiftigen festen und flüssigen Aerosolen. Die Verwendung ausserhalb dieses Einsatzbereiches ist nicht zulässig und kann zu schweren Gesundheitsschäden führen.

Ende der Haltbarkeit: 3 Jahre nach Herstellungsdatum (siehe Aufdruck auf Verpackung)

Warnungen:

1. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Gesundheitsschäden bis hin zum Tod führen.
2. Befragen Sie vor Benutzung der Maske Ihren Sicherheitsbeauftragten, wenn Sie unsicher sind.
3. Verwenden Sie diese Maske nur in ausreichend belüfteten Räumen
4. Nicht zur Verwendung in explosiver Atmosphäre geeignet.
5. Verlassen Sie den Arbeitsbereich sofort, wenn a) Das Atmen schwierig wird b) Schwindel oder andere Beschwerden auftreten
6. Gesichtsbehaarung, Bärte und Schmuck können den Sitz der Maske und damit die Wirksamkeit erheblich einschränken
7. Diese Maske darf nicht verändert oder modifiziert werden
8. „NR“ bedeutet, dass diese Maske nur zur Verwendung von einer Dauer von max. 8 Stunden (eine Schicht) geeignet ist. Danach ist die Maske zu entsorgen.
9. Lagern Sie die Masken in der Originalverpackung bei Temperaturen von -30°C bis +70°C und einer relativen Luftfeuchte von <80%

Markierung auf der Maske	Beschreibung	Erklärung
 Virtue Health SH9801 FFP2 NR EN 149:2001+ A1:2009 CE0598	 Virtue Health	Logo und Markenname
	SH9801	Modellnummer
	CE0598	Benannte Stelle
	EN149:2001+A1:2009	Europäische Prüfnorm
	FFP2 NR	Schutzklasse



Ende der Haltbarkeitsdauer
(Aufdruck auf Karton)



Temperaturbereich der
Lagerbedingungen



Trocken lagern
(Luftfeuchte <80%)

Hersteller:

Foshan Nanhai SanHuShangbang Protective Products Co Ltd
No. 24, East Industrial Zone, Mongolian Jincheng Industrial Zone
Danzao Town, Nanhai District, Foshan City, China

Importeur:

AVINOOR GmbH - Schlossgasse 5 - 96484 Meeder - Germany